

Как очищать стерилизатор?

1. Перед чисткой оборудования убедитесь, что питание отключено.
2. Для проведения процедуры применяйте мягкие моющие средства, разведенные в воде. Откажитесь от растворителей, содержащих спирт жидкостей и чистящих порошков-абразивов, а также от ватных тампонов. Используйте мягкую ткань, от которой не остается волокон. Необходимо очищать только корпус, выдвижной ящик и крышку, не воздействуя на другие части аппарата.
3. В заключение протрите все части стерилизатора сухой тканью для избавления от остатков влаги.
4. Очистив, не включайте стерилизатор сразу.