

Инструкции для пользователей.

Полоски ContacEZ® IPR подлежат стерилизации в автоклаве (только теплом пара, вплоть до 137°C (280°F)). Изделие многократного использования с центральной апертурой для лучшей визуализации. Аккуратно проводите полоской вперед-назад и только в щечно-язычном направлении для снятия необходимого количества эмали с проксимальной поверхности зубов.

1. Зажмите полоску между большим и указательным пальцами, введите ее в межпроксимальное пространство, и аккуратно проводите ею вперед-назад в щечно-язычном направлении до тех пор, пока полоска не станет пассивной. После этого возьмите полоску большей толщины, и проводите эту процедуру до тех пор, пока не снимите нужное количество эмали. Для контроля окончательного размера зазора используйте пошаговый измерительный калибр (толщиномер) ContacEZ® Incremental Thickness Gauge.
2. Благодаря естественной гибкости полоски ContacEZ® IPR, можно легко менять требуемую форму контактной поверхности зуба и снимать эмаль в области межпроксимального контакта, не создавая углов и поднутрений, не делая порезов губы или десен, не удаляя лишнюю эмаль.
3. Для восстановления натуральной гладкости эмали, можно отполировать шлифованную поверхность проксимального контакта полировальной полоской ContacEZ® Final Polishing Strip (серая - односторонняя - 0,05 мм – с ультратонким алмазным напылением). Полировальную полоску используют до тех пор, пока все прилегающие поверхности не станут гладкими.

Система ContacEZ® Restorative Strip System – это инновационная система точного снятия эмали абразивными полосками, предназначенная для создания идеальных проксимальных контактов и обеспечения оптимальной посадки коронок, виниров, вкладок/накладок, а также для создания точного анатомического контура полимерных композитных реставраций в проксимальных областях с минимальными затратами времени и усилий.

Дизайн, позволяющий работать одной рукой, предлагает оптимальный тактильный контроль и обеспечивает легкий доступ к узким участкам между зубами, как в передних, так и в жевательных областях зубного ряда.

Избавляет от необходимости придерживать небольшие реставрации, использовать вращательные инструменты или артикуляционные пленки.

Позволяет избежать рвотных позывов и не травмирует мягкие ткани.

Гибкие полоски могут изгибаться и соответствовать натуральным анатомическим контурам зубов.

Все полоски ContacEZ® подлежат автоклавной стерилизации и могут использоваться многократно